

Коврики многоцелевые гигиенические предназначены для применения в лечебно-профилактических учреждениях с целью обеспечения разрыва цепи распространения внутрибольничных инфекций в тех помещениях, где предъявляются повышенные требования к санитарному состоянию поверхности пола (операционные, бассейны, детские учреждения и пр.). Коврики являются наиболее простым способом санитарно-гигиенического контроля помещения. Коврики состоят из корпуса, изготавливаемого из поливинилхлорида (полиуретана, резины) и впитывающего мата-вкладыша из вспененного полиуретана. Выбор конкретного материала корпуса зависит от степени проходимости людей.



Размеры ковриков могут быть выбраны как типовыми, так и по индивидуальному заказу от 50 x 50 см.

КОВРИКИ

В коврик заливается дезинфицирующий раствор. Предпочтительно пользоваться все время одним и тем же средством дезинфекции, не добавлять в коврик одновременно дезинфектанты различных составов, так как они могут реагировать между собой, образуя соединения, не обладающие дезинфекционными свойствами. Рекомендуемые дезинфицирующие

средства – «Бриллиант» и «Астрадиз-Лайт» (растворы готовятся согласно инструкции, используя режимы дезинфекции различных объектов при инфекциях вирусной этиологии). Ежедневно необходимо удалять видимые загрязнения и доливать по необходимости раствор. Также каждые 7–10 дней необходимо промывать коврик водой.

Контурно-анатомическая доска обеспечивает направленно-равномерное положение тела (голова и торс) в горизонтальном и вертикальном положении. Рифлёная поверхность (с выемкой для затылка) контурно-анатомической доски предотвращает соскальзывание и обеспечивает устойчивое положение тела особенно в горизонтальном положении. Контурно-анатомическая доска сделана из современного конструкционного материала – полиуретана с упругой воздушной подушкой внутри. Благодаря своим особым эксплуатационным свойствам, полиуретан широко используется в качестве замены резины различных марок, каучуков, металла, пластика во многих отраслях промышленности.

КОНТУРНО-АНАТОМИЧЕСКАЯ ДОСКА «СПАСАТЕЛЬ»

В экстренных случаях контурно-анатомическую доску можно использовать для помощи пациентам в случае остановки сердца. Анатомический контур изделия обеспечивает направленно-равномерное приложение силы при прямом массаже сердца и откры-

тии дыхательных путей. Рифлёная поверхность предотвращает соскальзывание и обеспечивает устойчивое положение тела в момент массажа. Специальная выемка для затылка, кроме того, облегчает осуществление дыхания рот в рот.



Габаритные размеры: 60 x 40 x 6 см.
Вес изделия: 1,5 кг.



Группа компаний «Гигиена-Мед»
Россия, 119361, Москва, Озерная, д. 42 • Тел.: (495) 784-63-10, 741-56-97
mo@gmed.ru, boss@gmed.ru • www.gmed.ru



Работа медицинской сестры нередко оказывается тяжелым физическим трудом, особенно когда речь идет о пациентах, нуждающихся в специальном уходе. Перемещение таких пациентов – работа, после которой боли в спине и пояснично-крестцовой области – обычное явление. Мы предлагаем нашим клиентам «Легкое движение» – это очень простое, удобное и эффективное приспособление для перемещения лежачих больных с одной поверхности на другую (кровать, каталка, операционный, манипуляционный стол и т.п.).

В работе санитарки, медицинской сестры слайдер оказывает неоценимую услугу, особенно когда речь идет о пациентах, нуждающихся в специальном уходе.

Его легко сложить и потом опять применить для перемещения больных.

СЛАЙДЕР

Выдерживает нагрузку 200 кг на 1 кв. см. Скользящий чехол непромокаем. Его можно протирать влажной тряпкой, можно стирать при температуре 60 °С, но не в стиральной машине; дезинфицировать (мыть) любым дезинфицирующим средством, не вызывающим коррозию синтетического полимера.


Для обработки рекомендуются средства, не содержащие сильных окислителей (хлор, перекись), с моющим эффектом, например «Бриллиант» – раствор 0,5–2%, «Бриллиантовый свет» – раствор 0,15–3%, «Бриллиантовый рай» – раствор 0,1–2%, и в т. ч. содержащие спирты, например «Бриллиантовый спрей – 2».



Технические характеристики

- Размер: 170 x 50 см
- Вес: 4,5 кг
- Материал: нейлон, фанера

ГАРАНТИЯ – 1 год при соблюдении правил использования и отсутствии механических повреждений.
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ – бессрочный.

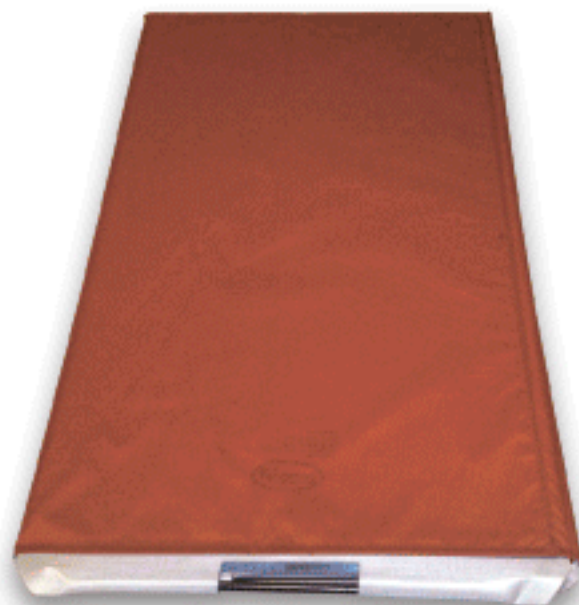

Слайдер делает перемещение больных легкой работой для медицинского персонала и создает комфорт и безопасность для пациентов.



Группа компаний «Гигиена-Мед»

Россия, 119361, Москва, Озерная, д. 42 • Тел.: (495) 784-63-10, 741-56-97
mo@gmed.ru, boss@gmed.ru • www.gmed.ru